


体部固定シェル取扱説明（胸腹部用）

① シート（450mm×600mm×2mm）ESS-15には固定用のシェル枠が付属しています。


② シートカット処理

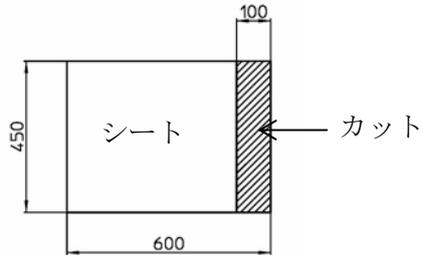

シートは、患者様の体型あるいは固定部位に合わせて、適当な大きさにカットしてご使用ください。

例えば、身長 170cm、体重 65kg 程度の方であれば、左図のように 100mm 程度カットしてご使用されることをおすすめします。


③ 枠の取り付け方法

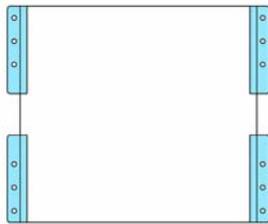


枠を左図の位置でしっかり奥まで押し込んで取り付けてください。

その状態で加温します。


(枠の断面図)

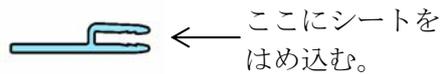


(拡大図)

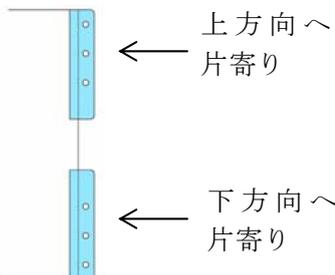

枠は2種類あり、各々孔位置が片側に寄っています。左図のように枠を取り付けてください。

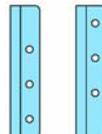

(取り付け状態での断面)

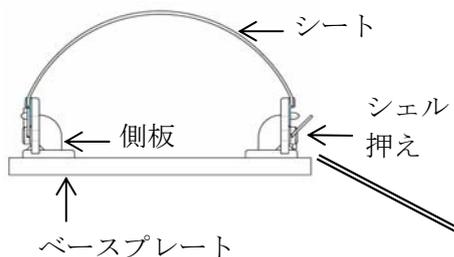

シートを固定具に取り付ける際に、枠の表・裏を確認してください。

頭部用のシェル枠とは反対向きで固定します。

(枠拡大図)



④ 完成

