

# 固定シェル（体部用） ご使用方法①


ESFORM

## ①シェルホルダーの準備

固定シェル（シートタイプ 450mm×600mm）ESS-15、ESS-19には固定用のシェルホルダーが付属しています。

1枚のシートに4本（2種類×2本）のシェルホルダーを使用します。

## ②シートカット処理

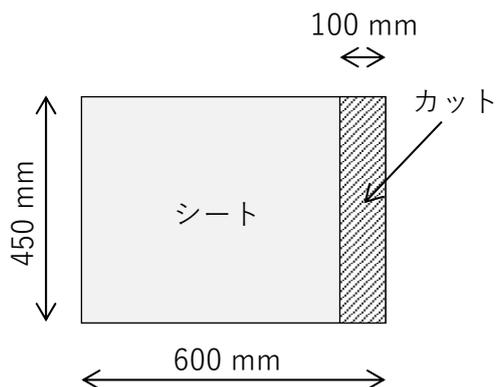


シートは、患者様の体型あるいは固定部位に合わせて、適当な大きさにカットしてご使用ください。

例えば、身長 170cm、体重 65kg 程度の方であれば、左図のように100mm程度カットしてご使用されることをおすすめします。

## ③コーティング剥離


シート表面のコーティングを剥がすことで加温時にシートとシェルホルダーの接着力が増し、より強固に取り付けられます。

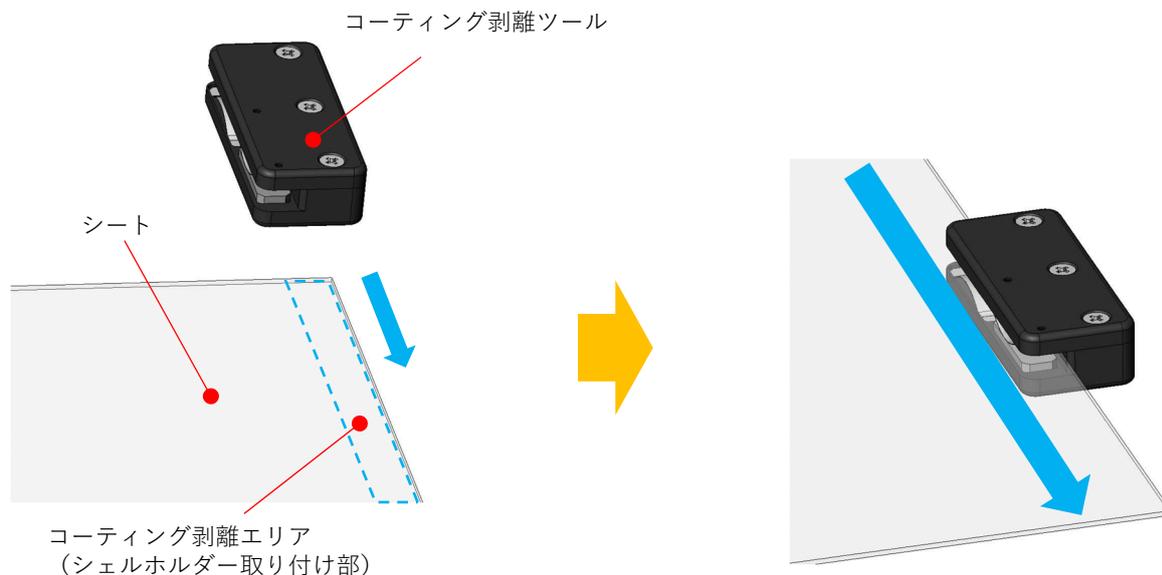


コーティング剥離ツールの溝にシートの端部を通します。

そのままシートの端までスライドさせます。  
※1回で両面のコーティングが剥離できます。


## ④ シェルホルダーの取り付け

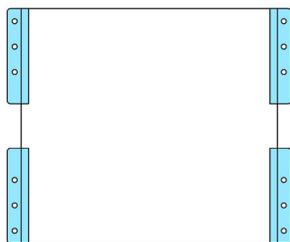

シェルホルダーを左図の位置でしっかり奥まで押し込んで取り付けてください。

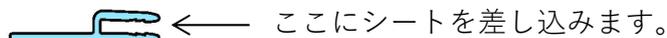

シェルホルダーの断面図

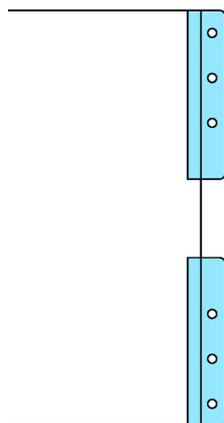

← 上方向へ  
片寄り

← 下方向へ  
片寄り

シェルホルダーは2種類あり、各々孔位置が片側に寄っています。  
左図のように取り付けてください。

## ⑤ 加温

シェルホルダーを取り付けた状態で加温してください。

## ⑥ 成型



溶融したシートを患部に乗せて、シェルホルダーを固定具に取り付けてください。

シートを幹部の形状に合わせて成形してください。



シェルホルダーの凸が外側になうように取り付けます。  
(頭部用のシェルホルダーとは反対向きで固定します。)

エンジニアリングシステム株式会社  
医療機器事業部  
長野県松本市笹賀5652-83  
TEL 0263-29-2633(直通) FAX 0263-29-2638  
E-mail [info-esform@esform.com](mailto:info-esform@esform.com)  
URL <http://www.esform.com>